

Ultra-dopasowanie. Ultra-pewność siebie.

# Ultra Frame®

**Nowa generacja półpiersi/okołniczery uszczelniająco-mocujących.**

Refundacja w kolostomii, ileostomii, urostomii, w innych przetokach i stomiach wymagających ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów.

**UltraFrame®** to rewolucyjna alternatywa dla półpiersi/okołniczery na bazie hydrokoloidów.

- Ultra-cienki, przezroczysty i dyskretny
- Skutecznie przylega do ciała
- Wodoodporny i oddychający
- Zapewnia wysoce bezpieczne uszczelnienie
- Pozwala pacjentom swobodnie się poruszać



*„UltraFrame® jest znakomity – cieniutki i miękki. Bardzo łatwo się dopasowuje.”*

Pan Władysław, lat 63  
urostomia, Polska

Kod produktu:  
**XUFWAFH33**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

# Potrzebujesz dodatkowej ochrony? NOWOŚĆ – ULTRAFRAME®

## Wyjątkowo dyskretnie i wygodnie zwiększa przyczepność sprzętu stomijnego:

najcieńszy półpiersień/półkołnierz na świecie –  
**142 razy** cieńszy niż wiodące marki hydrokoloidowe.  
Dopasowuje się do kształtów ciała **2,2 razy** efektywniej,  
niż inne wiodące produkty wykonane z cienikiego filmu,  
a oddycha **3,5 razy** efektywniej.



Uśnź z półpiersienia  
UltraFrame® papierek  
oznaczony ①



Przyklej UltraFrame®  
jednocześnie do ciała  
i do przylepca worka  
stomijnego



Uśnź papierek  
oznaczony ②



Doklej półpiersień  
UltraFrame® i wygładź go



Uśnź papierek  
oznaczony ③



Wygładź półpiersień  
UltraFrame®



Uśnź papierek  
oznaczony ④



Uchwyć biały pasek w środkowej  
części półpiersienia i uśnź  
matową folię

UltraFrame® można odebrać w ramach refundacji w kodzie P.1401 lub P.141A: kolostomia (K), ileostomia (I), urostomia (U), inne przetoki (IP):

- w firmowym Salonie Medycznym Welland Medical, ul. Słomińskiego 19 lok. 505, 00-195 Warszawa  
tel.: 790 420 033, tel.: 22 412 80 12, e-mail: [zamowienia@wellandmedical.pl](mailto:zamowienia@wellandmedical.pl)
  - w Sklepach Medycznych na terenie kraju, których wykaz jest dostępny na: [www.wellandmedical.pl](http://www.wellandmedical.pl)
- Telefoniczne Centrum Pomocy: tel. 790 420 069, 790 420 068, 731 755 662

[www.wellandmedical.pl](http://www.wellandmedical.pl)



Materiał wydrukowano 2023-07

Właścicielem niniejszego materiału edukacyjnego oraz podmiotem prowadzącym reklamę jest Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a, NIP: 5361909993. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ zawarte w niniejszym materiale są chronione prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz.U.2019.1231 t.j., z późn. zm.) lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela zabronione jest kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie dla celów publicznych i komercyjnych zamieszczonych w niniejszym materiale materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych oraz ich układu. Roszczenia z tytułu naruszenia praw będą dochodzone na drodze sądowej, a czynny karalne zgłaszane właściwym organom ścigania. Producentem wyrobów jest Welland Medical LTD, Wielka Brytania (Upoważniony Przedstawiciel Advena Limited, Malta).